

Splitmax

Set di osteotomi per distrazione orizzontale
Osteotomes set for horizontal distraction



Permette la distrazione orizzontale anche in creste particolarmente sottili
Makes horizontal distraction possible even when the ridge is particularly thin

La forma a "D" aiuta a prevenire la frattura delle pareti corticali e permette una distrazione monodirezionale
The "D" shape helps to prevent the fracture of the cortical walls and allows one direction distraction

Rapida e facile intercambiabilità
Fast and easily exchangeable

Distrazione orizzontale dello spessore crestale a 3-4-5mm
Horizontal distraction of the ridge width up to 3, 4 or 5 mm

Marcatura laser corrispondente alle lunghezze dell'impianto (8-10-11,5-13-15mm) e alla larghezza dello strumento per una semplice organizzazione ed uso
The laser markings correspond to the length of the implant (8, 10, 11.5, 13 and 15 mm) and the size of the device to ensure simplicity of organisation and use



Splitmax set

Ref 004158

Set di 6 osteotomi per "split crest" in acciaio inox. La lunghezza e la larghezza della parte lavorante sono contraddistinte dalla marcatura laser. Usando gli osteotomi in sequenza, le creste sottili vengono distratte gentilmente fino al raggiungimento dello spessore desiderato a 3-4-5mm; l'osteotomo di forma "D" per distrazione monodirezionale, riduce la concentrazione dello stress meccanico minimizzando il rischio di frattura della corticale palatale. Può essere utilizzato anche con la sistematica Osteomax.

A set of 6 stainless steel osteotomes for a "split crest". The length and the width of the working section are laser marked. By using the osteotomes in sequence, thin ridge crests are gently distracted until the required width of 3, 4 or 5 mm is reached. The "D" shaped osteotome, for one direction distraction, reduces the concentration of the mechanical stress thus minimising the risk of fracturing the palatal cortical bone. It can also be used with the Osteomax system.

Split Crest technique

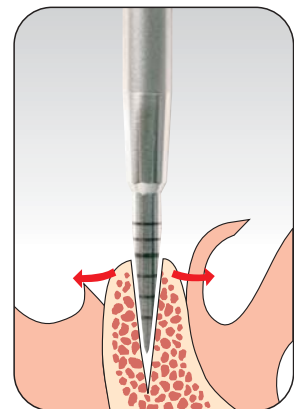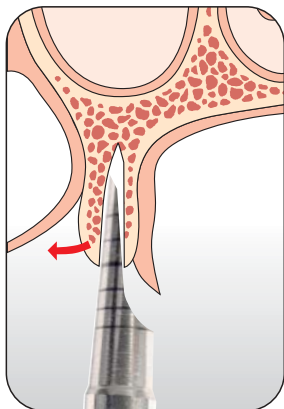

accessori /accessories

Osteomax Handle Ref 06-001

Manico universale in lega di Titanio Ti-6Al-4V con impugnatura a sezione quadra per una migliore manipolazione ed uso. Può essere utilizzato anche con la sistematica Osteomax.

The universal square handle in titanium Ti-6Al-4V alloy gives an ergonomic grip. It can also be used with the Osteomax system.



Osteomax T Handle Ref 06-002

Manico con inserto rimovibile a T per un miglior controllo e una corretta gestione dell'osteotomia manuale.

Handle with removable T-plug for a better control and a correct management of the manual osteotomy.



OsteoMallet Ref 06-010

Martello di 180 gr. con possibilità di battuta in teflon o in acciaio inox.

180 gr. hammer. Teflon head and stainless steel head available.



OsteoBox Ref 06-011

Tray in alluminio autoclavabile per una comoda organizzazione del set per osteotomia. Può essere utilizzato anche con la sistematica Osteomax.

The autoclavable aluminium tray ensures that the organisation of the osteotome set is simple. It can also be used with the Osteomax system.



Cod/Ref	Descrizione/Description	Q.tà/Q.ty	Cod/Ref	accessori /accessories	Q.tà/Q.ty
004158	Splitmax set di 6 osteotomi Splitmax set of 6 osteotomes	01	06-001	Osteomax Handle	01
			06-002	Osteomax T Handle	01
			06-010	OsteoMallet	01
			06-011	OsteoBox	01



C.G.M. S.p.A.

DIVISIONE MEDICALE META

Via E. Villa, 7 -42100 Reggio Emilia - ITALY - Tel.: +39 0522.50.23.11 - Fax: +39 0522.50.23.33

www.metahosp.com

